

PROCEDURA VESTIZIONE/SVESTIZIONE D.P.I.

(Circ. Min. Salute n. 5443/2020)

In caso di **sanificazione straordinaria**, necessaria se sono passati 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha frequentato la struttura scolastica, saranno messi a disposizione i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

- Copriscarpe
- Cuffia monouso per capelli
- Due paia di guanti in nitrile/vinile monouso
- Tuta monouso con cappuccio
- Visiera di protezione
- Mascherina FFP2

Vestizione

- Indossare i copriscarpe
- Eseguire l'igiene delle mani con soluzione alcolica
- Indossare un primo paio di guanti monouso
- Indossare il filtrante facciale (mascherina FFP2)
- Modellare lo stringinaso della mascherina sulla struttura ossea e verificarne la tenuta
- Indossare una cuffia monouso
- Indossare la tuta partendo dai piedi verso la testa
- Lasciare libero il cappuccio della tuta
- Il polsino dei guanti deve rimanere sotto la manica della tuta
- Se presenti, fissare le asole della tuta al terzo dito delle mani
- Indossare la visiera di protezione
- Indossare il cappuccio e chiudere completamente la cerniera della tuta
- Indossare un secondo paio di guanti monouso con polsino sopra la manica della tuta

Svestizione

- Togliere i copriscarpe e gettare nel sacchetto rifiuti
- Aprire la cerniera e liberare la testa dal cappuccio utilizzando entrambe le mani
- Mantenere la testa eretta per evitare di toccare collo e petto con la mascherina
- Rimuovere il primo paio di guanti e gettare nel sacchetto rifiuti
- Ancorare il guanto esterno e l'asola di una manica sfilando poi il braccio
- Liberare la manica opposta dall'interno
- Liberarsi della tuta verso il basso toccando solo la parte interna
- Gettare la tuta nel sacchetto rifiuti
- Rimuovere la visiera di protezione e sanificarla per successivo riutilizzo
- Rimuovere la mascherina toccando solo gli elastici e smaltire nel sacchetto rifiuti
- Togliere il secondo paio di guanti
- Rimuovere la cuffia per capelli
- Eseguire l'igiene delle mani con soluzione alcolica